



Kropsstøtte/ Kropsstøtte/ Kropsstöd/ Body support - VELA Tango

Montering af kropsstøtter

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)101001 Monteringskit for kropsstøtter (sæt)

(A)101080 Monteringskit for kropsstøtte (enkelt)

(A)928405 Monteringskiler (1-4 stk - afhængig af ryglænstype og ønsket vinkling)

(A)928415 Kropsstøtte, kort beslag, lille buet pude Hø 6x17 cm

(A)928416 Kropsstøtte, kort beslag, lille buet pude Ve 6x17 cm

(A)926114/928417 Kropsstøtte, lang beslag, buet pude Hø 6x17 cm

(A)927059/928418 Kropsstøtte, lang beslag, buet pude Ve 6x17 cm

(A)928419 Kropsstøtte, kort beslag, stor buet pude Hø 9x17 cm

(A)928420 Kropsstøtte, kort beslag, stor buet pude Ve 9x17 cm

(A)926113/928421 Kropsstøtte, lang beslag, stor buet pude Hø 9x17 cm

(A)927058/928422 Kropsstøtte, lang beslag, stor buet pude Ve 9x17 cm

(A)928423 Kropsstøtte, kort beslag, lige pude Ve 10x17 cm

(A)928424 Kropsstøtte, kort beslag, lige pude Hø 10x17 cm

(A)926121/928426 Kropsstøtte, lang beslag, lige pude Ve 10x17 cm

(A)926122/928425 Kropsstøtte, lang beslag, lige pude Hø 10x17 cm

(A)928080 Kropsstøtte ES5, lille buet pude Hø 6x17 cm

(A)928081 Kropsstøtte ES5, lille buet pude Ve 6x17 cm

(A)928082 Kropsstøtte ES5, stor buet pude Hø 9x17 cm

(A)928083 Kropsstøtte ES5, stor buet pude Ve 9x17 cm


(A)928084 Kropsstøtte ES5, lige pude Hø 10x17 cm

(A)928085 Kropsstøtte ES5, lige pude Ve 10x17 cm

DANSK

1. Skinne (A) til kropsstøtte og kiler (1-4 stk)* (B) monteres med skruer (C). Føl dig frem til hullerne og brug en spids genstand til at stikke hullerne ud i stoffet.
2. Kropsstøtten (D) skrues fast med skiver og bolte (E).
3. Indstil kropsstøtten i den ønskede højde og bredde og spænd alle bolte godt.

*afhængig af ryglænstype og ønsket vinkling

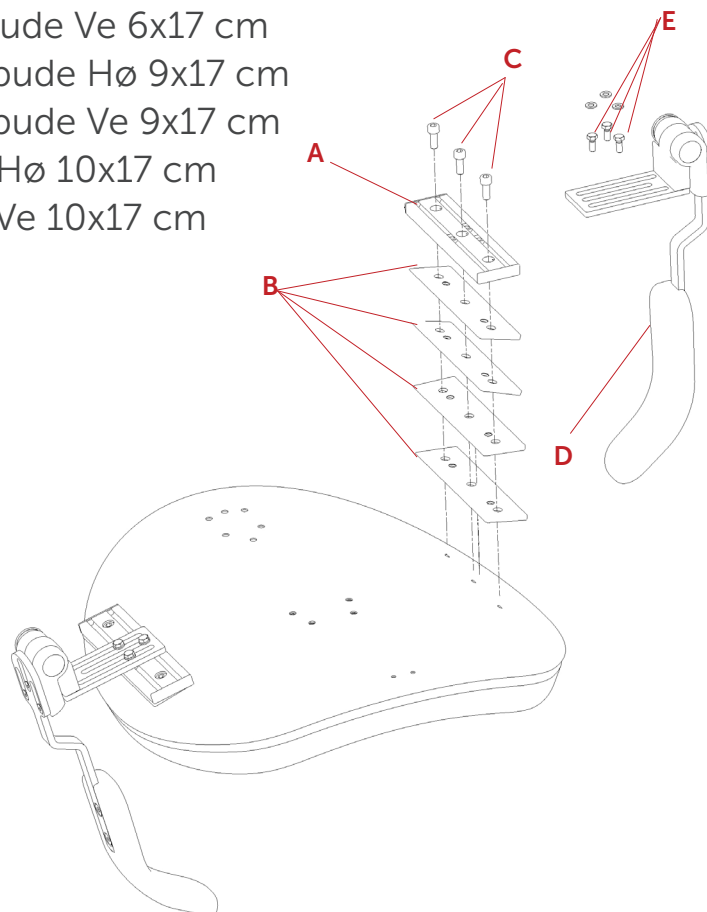



Kropsstøtte/ Kroppsstøtte/ Kroppsstöd/ Body support - VELA Tango

VELA Tango

NORSK

1. Skinne (A) til kroppsstøtte og kiler (1-4 stk)* (B) monteres med skruer (C). Føl deg frem til hullene, og bruk en spiss gjenstand til å stikke ut hullene i stoffet.
2. Kroppsstøtten (D) skrues fast med skiver og bolter (E).
3. Still inn kroppsstøtten i ønsket høyde og bredde, og stram alle boltene godt.

*avhengig av ryggstøtten og ønsket vinkling

SVENSKA

1. Skenan (A) för kroppsstödet och kilar (1-4 ST)* (B) monteras med skruvar (C). Känn dig fram för att hitta hålen i tyget och använd ett spetsigt föremål för att göra hål i tyget så att hålen blir åtkomliga.
2. Skruva fast kroppsstödet (D) med brickor och skruvar (E).
3. Justera kroppsstödet till lämplig höjd och bredd och dra åt alla skruvar ordentligt.

*beroende på ryggstödstyp och önskad angulering

ENGLISH

1. Use screws (C) to mount the body support track (A) and wedges (1-4 PCS)* (B). Find the holes by feeling for them and use a sharp object to make holes in the fabric.
2. Screw the body support (D) in place with discs and bolts (E).
3. Set the body support to the desired height and width, and tighten up all the bolts.

*depending on the backrest type and the desired angulation