




Arthrodesebeslag/ -brakett/ -fäste/ Arthrodesis bracket - VELA Tango

Montering af arthrodesebeslag

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

(A)923964 Arthrodeseelås samlet Hs

(A)923965 Arthrodeseelås samlet Vs

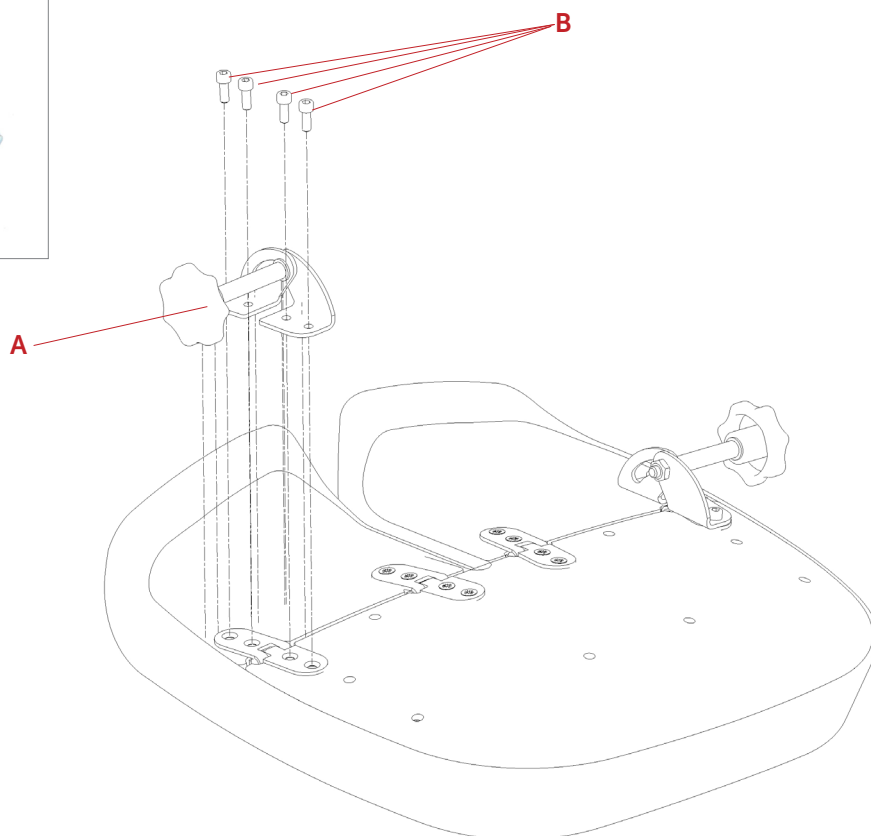

DANSK

1. Arthrodesebeslag (A) skrues fast med bolte (B).
2. Indstil Arthrodesebeslaget i den ønskede højde og spænd håndtaget godt.

SVENSKA

1. Skruva fast arthrodeseefäste (A) med skruvar (B).
2. Justera arthrodeseefäste till lämplig höjd och dra åt handtaget ordentligt.

NORSK

1. Arthrodesebrakett (A) skrues fast med bolter (B).
2. Still inn arthrodesebrakett i ønsket høyde og stram håndtaket godt.

ENGLISH

1. Screw the arthrodesis bracket (A) in place with bolts (B).
2. Set the arthrodesis bracket to the desired height and tighten up the handle.