



Sædeovertræk/ Setetrek / Sätesskydd / Seat cover - VELA Meywalk 4

Montering af sædeovertræk med gele på/ Guide to mount seat cover on VELA
Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

M104260 Til lille sadel

M104261 Til mellem sadel

M104262 Til stor sadel




Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey10



A



B

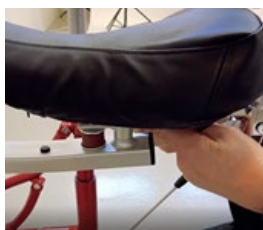

C

DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Åben velcrobåndene og lyn lynlåsene op fortil og bagtil på sædeovertrækket (A)
3. Fastgør sædeovertrækket på sædet af gangvognen (B)
4. lyn lynlåsen fortil og bagtil på sædeovertrækket og luk velcrobåndene under sædet (C) -tilsikre at velcrobåndene er strammet



Sædeovertræk/ Setetrek / Sätesskydd / Seat cover - VELA Meywalk 4

Montering af sædeovertræk med gele på/ Guide to mount seat cover on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Åpne borrelås-båndene og lukk glidelåsene fremme og bak på setetrekket (A)
3. Fest setetrekket på setet av gåvognen (B)
4. Lukk glidelåsen fremme og bak på setetrekket og lukk borrelås-båndene under setet (C) – sørg for at borrelås-båndene strammes godt

SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Öppna kardborrebanden och blytlåsen framtill och baktill på sätesskyddet (A)
3. Dra sätesskyddet över gåstolssätet (B)
4. Dra upp dragkedjorna fram- och baktill på sätesskyddet och stäng kardborrebanden under sätet (C). Se till att kardborrebanden sitter åt ordentligt.

ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Open the velcro straps and the zippers in the front and back end of the seat cover (A)
3. Mount the seat over onto the seat of the gait trainer (B)
4. Close the zippers in the front and back end of the seat cover and close the velcro straps under the seat (C) – make sure the velcro straps are tightened sufficiently.