



Overtræk benskilleplade/ Overtrekk benskilleplate / Överdrag benavskiljarplatta / Cover for leg divider - VELA Meywalk 4

Montering af overtræk til benskilleplade på/Guide to mount cover on leg divider on
VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

M013150 Til Micro & Small

M011740 Til Medium & Large



Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey8



A



B



C

DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Åbn overtrækket (A) og før det omkring benskillepladen nede fra og op (B).
3. Luk overtrækket omkring benskillepladen med velcrolukningen (C).



Overtræk benskilleplade/ Overtrekk benskilleplate / Överdrag benavskiljarplatta / Cover for leg divider - VELA Meywalk 4

Montering af overtræk til benskilleplade på/Guide to mount cover on leg divider on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Åpne overtrekket (A) og før det rundt benskilleplaten nedenfra og opp (B)
3. Lukk overtrekket rundt benskilleplaten med borrelås-lukkeren (C).

SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Öppna överdraget (A) och montera fast det genom att föra det över benavskiljarplattan nedåt och uppåt (B)
3. Stäng överdraget runt benavskiljarplattan med hjälp av kardborrstängningen (C).

ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Open the cover (A) and mount it on the leg divider from the bottom up (B)
3. Close the cover with the Velcro (C).