



Overtræk kropsring/ Overtrekk kropsring / Överdrag kroppsstöd / Cover on trunk support - VELA Meywalk 4

Montering af overtræk til kropsring på/ Guide to mount cover on trunk support on
VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

542319700


Flere størrelse til forskellige kropsringsstørrelser



Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey14



A

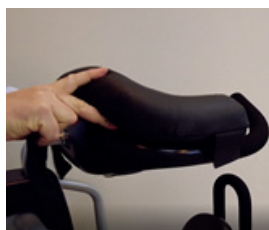

B



C

DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Åben velcrostropperne på overtrækket til kropsringen (A)
3. Overtrækket lægges ned over kropsringen (B)
4. Velcrostropperne lukkes rundt om kropsringen (C)



Overtræk kropsring/ Overtrekk kroppsring / Överdrag kroppsstöd / Cover on trunk support - VELA Meywalk 4

Montering af overtræk til kropsring på/ Guide to mount cover on trunk support on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Åpne borrelås-stroppene på overtrekket til kroppsringen (A)
3. Overtrekket legges over kroppsringen (B)
4. Borrelås-stroppene lukkes rundt kroppsringen (C)

SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Öppna kardborrebanden på överdraget till kroppsstödet (A)
3. Placera överdraget över kroppsstödet (B)
4. Stäng kardborrebanden runt kroppsstödet (C)

ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Open the velcro straps on the cover for the trunk support (A)
3. Lay down the cover on top of the trunk support (B)
4. Close the velcro straps around the trunk support (C)