



## Benglidestyr / Leg guides / Fotskyddsskena / Beinschienen

### DANSK

Monter benglidestyr på indersiden af stellet i begge sider, så de dækker for hjulet.

Det gøres ved at klikke de grå bøjler på bagsiden af benglidestyret ind over stellet.

De grå bøjler kan låses om stellet ved at klikke de medfølgende spænder ind over de grå bøjler.






## Benglidestyr / Leg guides / Fotskyddsskena / Beinschienen

### ENGLISH

Mount the plastic leg guides on the inside of the frame on both sides, so they cover the rear wheels.

The leg guides are mounted by clicking the grey brackets over the frame of the gait trainer on both sides.

The gray brackets are locked onto the frame with the supplied buckles.

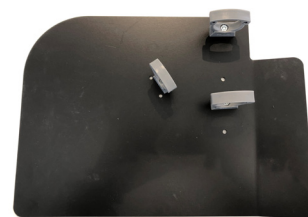

### SVENSKA

Montera fast glidskenorna i svart plast på insidan av ramens båda sidor så att de täcker hjulet helt.

Montera glidskenorna genom att klicka fast de grå fästena på baksidan av glidskenorna över ramen.

Sätt fast de grå fästena med hjälp av medföljande spännen.



### DEUTSCH

Montieren Sie die Kunststoff-Beinschienen an den Innenseiten des Rahmens, sodass sie die Hinterräder abdecken.

Befestigen Sie die Beinführungen, indem Sie auf beiden Seiten die grauen Halterungen über den Rahmen des Gehtrainers klicken.

Die grauen Halterungen werden mit den mitgelieferten Schnallen am Rahmen befestigt.

