




Rotation / Rotasjon - VELA Tango 700-serien

Afmontering af rotationsgreb og låsning af rotation på VELA Tango 700-serien



Videoinstruktion:
v1935.dk/106247

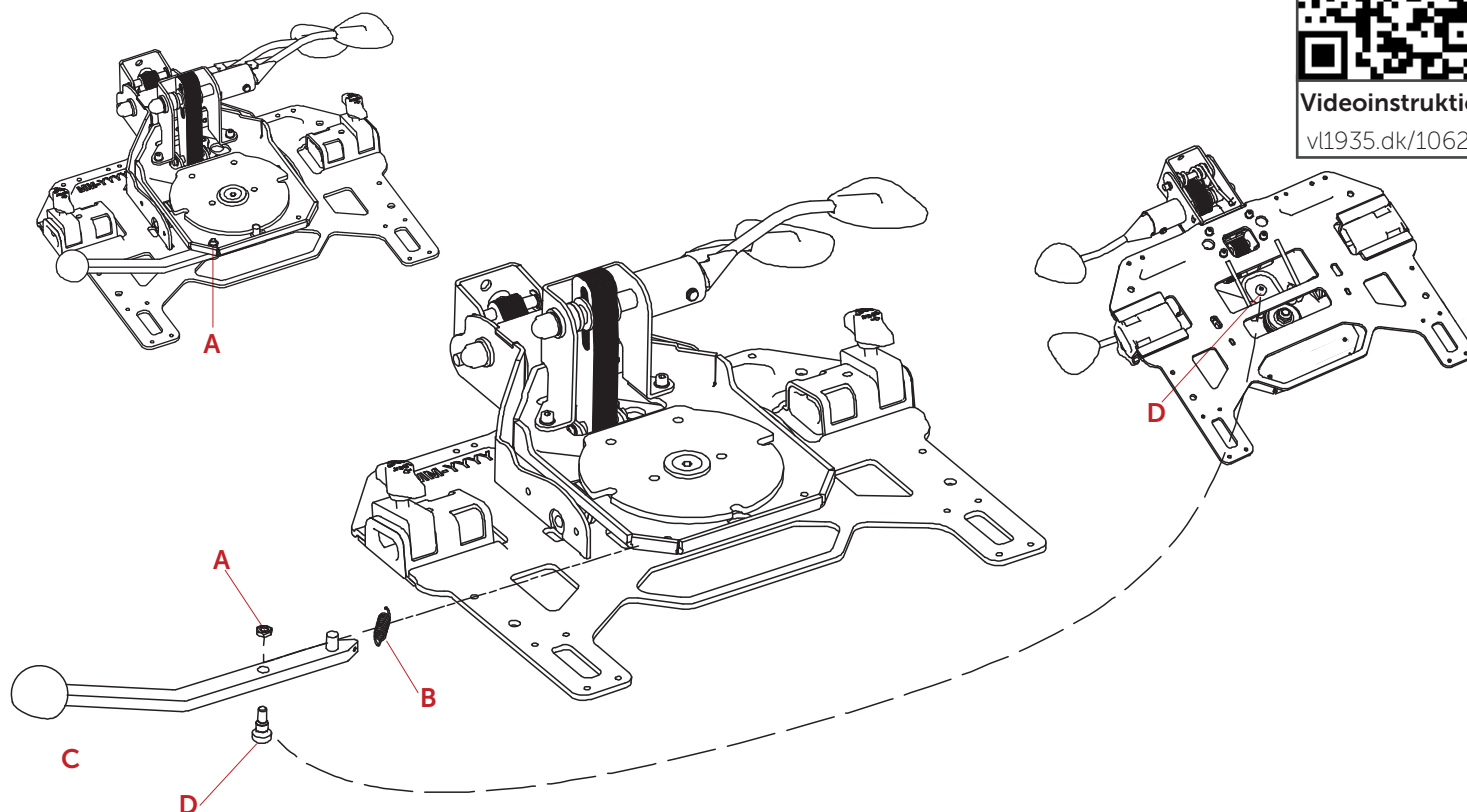

DANSK

1. Fjern sædet (Se vejledning 106235).
2. Møtrik (A) skrues af med 10 mm fastnøgle.
3. Møtrik (A), fjeder (B) og rotationsgreb (C) fjernes. Skruer (D) skal bruges igen.
4. Skruen (D) skrues i bærepladen ovenfra, som vist på billedet til højre.
5. Monter sædet igen.

NORSK

1. Fjern setet (se veiledning 106235).
2. Mutter (A) skrues av med en 10 mm fastnøkkel.
3. Mutter (A), fjær (B) og rotasjonshåndtak (C) fjernes. Skruer (D) skal brukes igjen.
4. Skruen (D) skrues i bæreplaten ovenfra, som vist på bildet til høyre.
5. Monter setet igjen.

SVENSKA

1. Ta bort sätet (se instruktion 106235).
2. Mutter (A) skruvas av med en 10 mm fast nyckel.
3. Mutter (A), fjäder (B) och rotationshandtag (C) tas bort. Skruv (D) ska användas igen.
4. Skruven (D) skruvas i bärplattan uppifrån, som visas på bilden till höger.
5. Montera tillbaka sitsen.

ENGLISH

1. Remove the seat (see instructions 106235).
2. Nut (A) is unscrewed with a 10 mm wrench.
3. Nut (A), spring (B), and rotation handle (C) are removed. Screw (D) will be reused.
4. The screw (D) is screwed into the bearing plate from above, as shown in the picture on the right.
5. Reinstall the seat.